

Penimaster - Manualul Utilizatorului

INTRODUCERE

Felicitari
Stimati clienti,
Va multumim ca ati ales PeniMaster. Ati ales singurul principiu cunoscut pentru o permanenta marire a penisului fara durere si fara riscuri. Daca urmariti instructiunile folosirii PeniMaster, penisul dumneavoastra va deveni mai lung si mai gros atat in stare flasca cat si erecta. Peni Master este de asemeni pentru corectia curburilor nedorite ale penisului si poate fi folosit pentru extensia preputiului (i.i. in cazul celor circumcisi)
Imbunatatind circulatia si intarind musculature penisului, in plus creste senzatiile de placere, erectiile mai puternice si de durara mai mare, asigurand revitalizarea generala a energiei sexuale .

Multumita utilizarii PeniMaster multi utilizatori au depus numeroase complexe datorate formei penisului care timp de multi ani a fost un impediment pentru o viata sexuala libera si naturala. Deasemenea gasirea unei partenere devine mult mai usoara cunoscand propriile performante fizicale.

PeniMaster poate fi usor folosit fara ajutorul unuei alte personae (ex. Terapeut) PeniMaster produce aceleasi rezultate indiferent daca utilizatorul este circumcise sau nu. PeniMaster este un dispozitiv medical profesional si potrivit pentru toate varstele. Oricum, noi recomandam folosirea lui doar de catre adulti, pentru a ne asigura ca penisul a ajuns la marimea sa naturala inainte de inceperea tratamentului.

Penimaster a fost optimizat pentru securitate si confort maxim si a fost aprobat de Ministerul Sanatatii in Germania. .
PeniMaster are sigiliul CE(Conformité Européenne - European health & safety product label) si este brevetat in Europa si SUA.

Cum functioneaza

Principiul PeniMaster e simplu: Tractiunea continua aplicata pe o perioada extinsa de timp stimuleaza tesutul sa creasca: noi cellule se formeaza, penisul devine mai lung si mai gros. Distributia inegala de tesut in zona penisului - ceea ce ii poate provoca o curbare – este balansata odata cu aparitia noului tesut: penisul devine mai drept. Cu PeniMaster, baza poate fi intinsa mai mult decat restul penisului, ceea ce inseamna ca alungirea acestea este si ea posibila(a se vedea instructiunile).

Nota: Desi penisul pare mai subtire in timpul stretchingului, acesta va reveni fie la grosimea initiala, fie va mai creste in grosime, dupa folosirea dispozitivului.

Meicina moderna foloseste principiul cresterii prin tractiune in ortopedie sau chirurgia plastica, spre exemplu, unde este folosit si un echipament special de tractiune.

Ideea de a mari penisul folosind tractiune permanenta nu este, cu siguranta, noua. Triburile Karamojong din nordul Ugandei si Sadhus din India au obtinut lungimi impresionante ale penisului, prin atasarea unor greutate de acestea.(a se vedea Encyclopaedia Britannica; Stern 49/95).

FOLOSIREA PENIMASTER

Aplicare

Eficiența Penimaster depinde atât de forța de tracțiune exercitată cât și de perioada de utilizare. Numai un echilibru perfect între forța de tracțiune și perioada folosirii va garanta cele mai bune rezultate.

(!) În general, folosirea dispozitivului PeniMaster trebuie să fie întotdeauna o experiență plăcută care să nu provoace, sub nici o formă, durere. Apariția acesteia survine folosirii incorecte (spre exemplu setarea unei forțe de tracțiune prea mare sau o fixare prea stransă)

INSTRUCȚIUNI

- a) Îndepartați suprafața de suport de tije de suport
- b) Scoateți centura de fixare din deschizăturile din suprafața de suport

IMPORTANT: Impingeți ambele aripi de închidere înspre partea de jos a suprafeței de suport. Dacă acest lucru nu este făcut, centura de fixare se poate strica. Același lucru se aplică și în cazul scoaterii după folosire sau în cazul în care penisul este slăbit folosind centura de fixare.

- c) Însurubati suruburile pentru reglare până la nivelul cel de jos
- d) Selectați corect lungimea totală a dispozitivului (corespunde aproximativ cu lungimea totală a penisului în stare erectă + 1.5 cm). Scoateți, conectați sau înlocuiți tije de extensie furnizate pentru a obține o lungime de bază, astfel încât să vi se potrivească. Tije de extensie sunt de 2, 4, 6, sau 8 cm lungime și pot fi conectate una de cealaltă. Acest lucru duce la următoarele lungimi de extensie: 10 cm (tija de 8 + tija de 2); 12 cm (8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6).


(!) Cele 6 mini-tije (furnizate ca seturi de două tije însurubate între ele, de lungime 1.5 cm fiecare) sunt folosite pentru ajustările fine de 0.5, 1 sau 1.5 cm.

PUNEREA DISPOZITIVULUI

1. Alungiți penisul cu mâna presă de un minut. Treceți penisul, cât este în stare flască, prin atașament.
2. Metoda de fixare Nr1 – Pentru o alungire mai pronunțată a bazei: pentru a alungi mai mult baza sau mai în relație cu penisul (spre exemplu, în cazul unui penis circumscris), plasați garoul peste bază, la o distanță suficientă de gland (dacă acest lucru este necesar). Acest proces va întinde mai pronunțat pielea și astfel va stimula mai intens creșterea.
Metoda de fixare nr2 – Pentru o alungirea puțin pronunțată a bazei: Pentru a face acest lucru, trageți înapoi baza și puneți garoul în spatele glandului. Acest proces oferă o alungire și o stimulare a creșterii mai reduse decât în cazul Metodei de fixare Nr1.
3. Puneți centura de fixare peste garou, astfel încât curbura formată în centura de fixare (între cele două “urechi”) să indice către gland. *Garoul poate fi înfășurat în jurul penisului de câte ori este confortabil, altfel poate fi scurtat la o lungime corespunzătoare sau, pur și simplu, dat jos.*
4. Impingeți ambele capete ale centurii de fixare prin deschizăturile suprafeței de suport. Puneți degetul între penis și suprafața de suport fără să piscați pielea din deschizături. Strângeți bine capetele centurii de fixare, după care scoateți degetul.
5. Acum penisul dvs. este fixat pe suprafața de suport.
(!) Evitați presiunea excesivă asupra penisului! Dacă penisul sau glandul își schimbă culoarea, slăbiți imediat centura de fixare și masați penisul să reactivați circulația sângelui. În timpul primelor zile de folosire, fiți atenți la eventualele schimbări negative în formă sau funcționarea penisului și întrerupeți folosirea până în momentul în care aceste simptome dispar complet.
6. Impingeți suprafața de suport care susține penisul, la capatul tijelor.
7. Aveți opțiunea purtării dispozitivului atât în sus, cât și în jos, fără ca să fie, într-un fel sau altul, afectate rezultatele.
8. Ajustați tracțiunea dispozitivului, slăbind filetul.

CUM SĂ AJUSTAȚI FORȚA DE TRACȚIUNE

Sunt 5 creștături la capatul fiecărei tije de metal. Folosind principiul balantei, ele indică forța de tracțiune exercitată penisului.

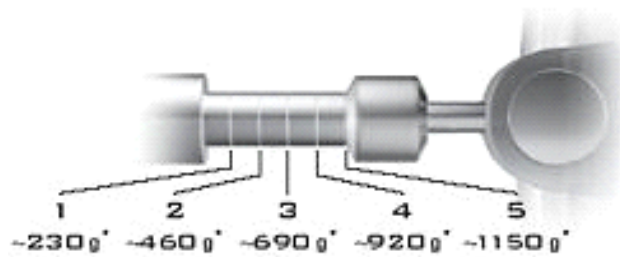

Acesta este un exemplu in sensul citirii balantei. In momentul purtarii dispozitivului, daca, spre exemplu, acesta se extinde pana cand numai 3 din cele 5 marcaje raman vizibile, atunci forta de tractiune este intre 480 si 690 de grame. Daca numai ultimul marcaj este vizibil, atunci tractiune este cuprinsa intre intervalul 920-1150 grame. Este recomandat sa folositi o forta de tractiune mai mica la inceput, pana cand va obositi cu dispozitivul(0-230 grame).

Pentru a creste forta de tractiune exercitata penisului, rasuciti in mod egal ambele suruburi de ajustare invers sensului acelor de ceasornic. Acest process va creste lugimea totala a dispozitivului. Pentru a diminua forta de tractiune, rasuciti suruburile in sensul acelor de ceasornic.

Nota: filetul poate fi desurubat numai daca penisul este strans usor, selectand lungimea corecta a tijei. Altfel, nu se va crea forta de tractiune, sau aceasta va fi insuficienta. Selectati o forta de tractiune mica la inceputul tratamentului, pentru a va obisnui cu dispozitivul, ceea ce va dura in jur de doua saptamani. Pentru un antrenament efficient selectati cea mai mare forta de tractiune posibila cu care puteti purta dispozitivul timp de 60-90 minute fara probleme.

Nota: Cand penisul se intinde mai mult dupa o perioada a folosirii, rezultand astfel o forta de tractiune mai mica, va rugam sa reajustati forta de tractiune corespunzator. Mariti tractiunea incet pe o perioada de cateva saptamani, pana cand numai un marcaj ramane vizibil pe balanta(daca acest lucru este posibil). Daca simtit durere, va rugam sa setati o forta de tractiune mai mica.

FIXAREA EXCESIVA SAU DUREROASA POATE AVEA UN AFECT NEGATIV ASUPRA CRESTERII CELULELOR

(!) Pentru siguranta dvs., nu ppuneti greutati mai mari de 1150 de grame, chiar daca acest lucru nu va ofera o stare de discomfort.

CAT TIMP TREBUIE PURTAT DISPOZITIVUL PENIMASTER?

Penimaster trebuie purtat cel putin 3 ore pe zi. Folosindu-l mai mult va ajuta la imbunatatirea rezultatelor. La fiecare 60-90 de minute, luati o pauza de 15 minute si masati penisul sa activati circulatia sangelui. Aceste pauze scurte sustin procesul de crestere.

Dupa o perioada suficienta acomodarii cu Penimaster, il puteti purta si sub o lenjerie comoda(va rugam sa nu uitati de pauzele de 15 minute!). Folosindu-l timp de 6 ore pe zi, veti avea rezultate optime.

In principiu, nu exista un numar maxim de luni in care puteti folosi PeniMaster. Pe de alta parte, cu cat folositi mai mult dispozitivul, cu atat rezultatele sunt mai notabile. Timpul minim de folosire pentru rezultate vizibile, este de 3 Ore pe zi, pe o perioada de o luna. Rezultatele obtinute in prima luna pot surveni datorita cresterii tesutul si pot sa nu fie permanente.

Dat fiind, ca in timpul somnului nu putet face acele pauza de 15 minute, nu este recomandata folosirea Penimaster, in acea perioada. Daca totusi doriti s ail folositi si atunci, trebuie sa aveti suficienta experienta cu folosirea acestuia si cu setarile care sunt potrivite pentru dvs. pe aceasta perioada.

Nu trebuie sa va ingrijorati ca ati putea pierde rezultatele obtinute in cazul nefolosirii pe o perioada mai lunga a dispozitivului(spre exemplu, intr-o vacanta). Cresterea care a fost obtinuta deja se mentine si va continua dupa reinceperea tratamentului. Va rugam sa va amintiti ca aceasta metoda va ajuta penisul sa creasca – si, fireesc, acestu process se face in timp!

Fiti optimist si nu va pierdeti rabdarea daca nu vedeti rezultate din primele zile. Un penis mai mare va fi rasplata perseverentei dvs.!

SFATURI CU PRIVIRE LA IGIENA

Pentru a va putea bucura de dispozitivul PeniMaster cat mai multa vreme, va rugam sa il curatati, dupa fiecare utilizare, cu apa calda si sapun. Spalati minutios atat penisul, cat si dispozitivul, pastrand astfel o stare de igiena, prevenind infectiile si, de altfel, usurand fixarea penisului prinintermediul centurii de fixare.

PRECAUTII SI AVERTISMENTE

Folosirea penimaster nu are efecte secundare . O usoara inrosire in zona centurii de support este normala in timpul folosirii datorita incarcaturii mecanice si dispare odata ce dispozitivul este scos.

CAND NU TREBUIE SA FOLOSITI PENIMASTER

- sub influenta alcoolului
- sub influenta narcoticelor
- sub influenta sedativelor
- sub influenta somniferelor sau a calmantelor
- in cazul unei alergii la crom sau a unei intolerante a organismului la policarbonat sau TPE
- in cazul inc are aveti probleme cu penisul testicolele sau uretra
- in cazul in care aveti venele sau tesutul conector slabit
- in cazul existentei durerii sau aparitiei in ei in zona penisului sau a testiculelor
- in perioada unui implant penian

In cazul durerii, schimbarii culoriisau ale altor cazuri de iritatii sau schimbari functionale ale penisului, glandului sau testiculelor, opriti imediat tratamentul si nu reincepeti tratamentul decat dupa ce simptomele dispar complet. Daca simptomele continua sau se inrautatesc si dupa oprirea tratamentului, consultati un medic sau urolog. Daca, din cauza unor privatiuni fizice sau a unei boli, nu sunteti sigur daca tratamentul cu PeniMaster este potrivit pentru dvs., va rugam sa consultati un medic sau urolog inainte folosirii sale.